

# *Angelcare*



**AC 300**



### **KORAK 3. KORIŠTENJE MONITORA**

Stavite dijete u krevetić i uključite monitor. Kada dijete vadite iz krevetića isključite monitor. Ukoliko zaboravite isključiti «pred alarm Tik» će se oglasiti nakon 15 sekundi kao podsjetnik.

### **KORAK 4. BATERIJE**

Angelcare monitor kretanja djeluje pomoću baterija. Baterije će trajati 3 do 4 mjeseca. Kada monitor počne proizvoditi zvuk brzog škljocanja treba zamijeniti baterije.

NAPOMENA:

- Testirajte vaš Angelcare monitor prije prvog korištenja a onda periodično.
- **Kada je monitor u upotrebi nemojte koristiti kabele mobitela ili kabele uređaja koji proizvode vibracije. Alarm se neće oglasiti ukoliko monitor i dalje otkriva kretanje.**
- Angelcare monitor je siguran. Ne nosi električne struje i ne isijava nikakav oblik energije.
- Vaš monitor se može koristiti u svakom krevetiću ili prostoru (gdje nema kretanja ili vibracije) namijenjenom za sigurnost djeteta.

### **TESTIRANJE VAŠEG ANGELCARE MONITORA**

**NAPOMENA: Testirajte vaš Angelcare monitor prije prvog korištenja prema osnovama kako biste bili sigurni da funkcionira pravilno.**

Angelcare monitor može se koristiti izvan krevetića na raznim mjestima. Testirajte vaš monitor kada premještate senzor jastuk na novu lokaciju kako biste se uvjerali da je osjetljivost pravilno podešena novim postavama ili madracu. Konzultirajte odjeljak podešavanje osjetljivosti kretnji.

**Korak 1.** Uključite funkciju «Tik». Lagano stavite vašu ruku na madrac. Zeleno svjetlo će nastaviti svijetliti sa svakim vašim pokretom. Maknite ruku sa madraca. Uslijed pomanjkanja kretnji, zvuk «pred alarma Tik» će se emitirati nakon 15 sekundi, 5 sekundi kasnije zvoniti će alarm i crveno svjetlo će neprestano svijetliti.

**NAPOMENA:** Ukoliko se alarm ne oglasi, senzor jastuk možda otkriva kontinuiranu vibraciju sa poda, jaku promaju ili je krevetić pomaknut. Izbjegavajte kontakt sa krevetićem kada je monitor u funkciji. Postavite krevetić blizu zida i daleko od jakih zračnih struja. Možda će trebati sniziti osjetljivost senzor jastuka, konzultirajte odjeljak Podešavanje osjetljivosti kretnji.

**Korak 2.** Za ugasiti alarm stavite vašu ruku lagano na madrac kako bi senzor jastuk ponovno počeo otkrivati kretanje. Pokazatelj alarma crveno svjetlo na monitoru će nastaviti svijetliti 1 minutu (slika 3).

**Korak 3.** Kada monitor počne proizvoditi zvuk brzog «škljocanja» zamijenite baterije.

## OTKRIVANJE SMETNJI

Problem	Mogući kvar	Rješenje
<b>Lažni alarmi.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beba je izvađena iz krevetića i monitor nije isključen.</li> <li>• Kabel senzor jastuka nije pravilno spojen u monitor.</li> <li>• Senzor jastuk nije u pravom kontaktu sa madracem ili madrac ne leži na kompletno ravnoj i tvrdoj površini.</li> <li>• Beba je stavljena daleko od senzor jastuka, na rub krevetić</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite monitor.</li> <li>• Provjerite vezu između senzor jastuka i monitora. Isključite i ponovno spojite kabel.</li> <li>• Vodite računa da nema nikakvih prostirki između madraca i senzor jastuka. Senzor jastuk mora ležati na kompletno ravnoj i tvrdoj površini. Stavite komad šperploče od 6 mm kako biste pokrili cijelu veličinu krevetića.</li> <li>• Vodite računa da je senzor jastuk postavljen kako je opisano u odjeljku 4 jednostavna koraka. Treba prilagoditi osjetljivost konzultiranjem odjeljka Podešavanje osjetljivosti kretnji.</li> </ul>
<b>Alarm se ne oglašava.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor otkriva kretnje kada je dirnut krevetić.</li> <li>• Monitor otkriva kretnje izvan krevetića kao što su motorizirani uređaji, jake promaje, itd.</li> <li>• Osjetljivost je podešena previsoko.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izbjegavajte kontakt sa krevetićem kada je monitor uključen.</li> <li>• Postavite krevetić blizu zida kako biste izbjegli otkrivanje kretnji izvan krevetića.</li> <li>• Treba smanjiti osjetljivost konzultirajući se sa odjeljkom Podešavanje osjetljivosti kretnji.</li> </ul>
<b>Svijetlo pokazatelja alarma je crveno (monitor jedva otkriva kretnje).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senzor jastuk nije u pravom kontaktu sa madracem ili madrac ne leži na kompletno ravnoj i tvrdoj površini.</li> <li>• Beba je u jako dubokom snu ili je stavljena daleko od senzor jastuka, na rub krevetića.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodite računa da nema nikakvih prostirki između madraca i senzor jastuka. Senzor jastuk mora ležati na kompletno ravnoj i tvrdoj površini. Stavite komad šperploče od 6 mm kako biste pokrili cijelu veličinu krevetića.</li> <li>• Vodite računa da je senzor jastuk postavljen kako je opisano u odjeljku 4 jednostavna koraka. Konzultirajte odjeljak Podešavanje osjetljivosti kretnji.</li> </ul>

## GARANCIJSKI LIST

Angelcare vam daje garanciju za uređaj Angelcare Monitor (Model AC300) 1 godinu od dana kupnje uređaja.

Ukoliko uređaj nije ispravan uslijed korištenja u normalnim uvjetima u roku od godine dana uređaj je potrebno reklamirati kod distributera ili u trgovini gdje ste kupili uređaj.

Angelcare će vam popraviti uređaj ili dati drugi.

Angelcare snosi sve troškove popravka ili zamjene.

Garancija se ne odnosi na: oštećenja uslijed nepravilnog korištenja, nezgoda, nepravilne opskrbe napona,...Ne odnosi se ni ukoliko vlasnik uređaja ide sam popravljati uređaj. Garancija se odnosi smo na gore navedene primjere.

Ekskluzivni distributer za Hrvatsku:

Jadransko more d.o.o.  
Vrisna bb, 21 465 Jelsa

Info: +385 98 433 430  
[info@sigurnodijete.com](mailto:info@sigurnodijete.com)  
[www.sigurnodijete.com](http://www.sigurnodijete.com)

Datum kupnje:



